

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**

Nº 01

**TÍTULO:
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE ESTÉTICA****REVISÃO:**
00**Realizado Por:**
_____**Aprovado Por:**
_____**Cópia
Controlada:**
01**DATA:**
//____**1 Objetivo:****2 Campo de aplicação:**

Aparelhos de estética utilizados na Estética/Clinica/Estudio/Sala de atendimento

..... :

Listar o nome dos aparelhos, marca, ano de fabricação.....

3 Responsabilidade e execução:

Profissional responsável pelo manuseio do aparelho.....

4 Referências:

Manual de instruções do aparelho.

5 Periodicidade:

Antes de iniciar a utilização do equipamento e após a sua utilização a cada cliente.

6 Materiais necessários:

Algodão descartável;

Solução antisséptica (Ex: Solução de clorhexidine ou álcool 70%);

Papel toalha descartável;

7 Procedimento a ser realizado:

A – Antes de iniciar o uso do equipamento:

Com o equipamento montado e dentro das condições para uso, certificar-se de que este se encontra desligado, com o cabo de força fora da tomada;

Com um algodão umedecido com a solução antisséptica, friccionar por no mínimo 30 segundos por toda a extensão do acessório que entra em contato com a cliente;

Repetir o passo anterior para todos os acessórios disponíveis para o uso;

Finalizado esta higienização inicial, pode ligar o aparelho e iniciar o seu uso.

B – Após a utilização do equipamento:

Após a utilização do equipamento, desligar este e retirar o cabo de força da tomada;

Retirar o excesso de produto cosmético retido nos acessórios com o auxílio de papel toalha descartável;

Repetir o passo anterior para assegurar completa retirada de produto do acessório;

Finalizar a higienização friccionando algodão embebido em solução antisséptica por toda a extensão do acessório;

Repetir os três passos anteriores para todos os acessórios utilizados durante o protocolo.